

Introductie:

Al eeuwenlang wordt steenzout gebruikt om luchtwegproblemen als astma, COPD, bronchitis, sinusitis, allergieën en andere ademhalingsproblemen te verlichten. Zoutmijn- en zoutkamertherapie zijn erg populair in Europa. De Dry Salt Inhaler brengt dit natuurlijke microklimaat naar u toe. De Dry Salt Inhaler gebruikt geselecteerde therapeutische mineralen, in 100% natuurlijke vorm, welke worden gewonnen uit de wereldberoemde Transilvaanse Praid zoutmijn in Roemenië. Dit wonderbaarlijke zout is verpakt in een houder van kunststof van medische kwaliteit met een uniek eenweg veiligheidsventiel dat voorkomt dat het zout vervuild wordt en ervoor zorgt dat de gebruiker correct ademhaalt om het maximale therapeutisch effect te bewerkstelligen.

Farmacologische eigenschappen van het zout:

Mucolitsisch, mucokinetisch en hoestbevorderend, anti-bacterieel, antimycotisch, antiallergisch en antiphlogistisch (ontstekingsremmend).

Chemische componenten:

Natrium Chloride, Magnesium, Calcium en andere mineralen in natuurlijke vorm.

Onderhoud:

U dient periodiek te controleren op zichtbare verstoppingen in het luchtkanaal aan de onderzijde. Om deze te verwijderen kunt u met behulp van een naald de vastzittende zoutdeeltjes losdrukken zodat er wederom lucht door de opening kan stromen.

- Maak de buitenkant van de Dry Salt Inhaler alleen schoon met een klamme schone doek.
- Alleen de neusadapter kan worden gewassen. Droog de adapter goed af voor gebruik.

Bij het aanbevolen gebruik gaat de Dry Salt Inhaler ongeveer 1 jaar mee.

Waarschuwingen:

- Laat geen speeksel of andere vloeistof door de Dry Salt Inhaler lopen;
- Bewaar de Dry Salt Inhaler op kamertemperatuur op een schone en droge plaats. Bewaar hem niet in de badkamer of douche!;
- Dit product kan naast elke voorgeschreven medicatie of therapie worden gebruikt.
- Laat de Dry Salt Inhaler niet vallen. Dit kan de kristallen doen breken. Het is belangrijk dat de kristallen intact en in de Dry Salt Inhaler blijven om irritatie van de neusholten te voorkomen;
- Gezamenlijk gebruik wordt niet aanbevolen.

Speciale waarschuwing:

Gebruik de Dry Salt Inhaler NIET tijdens een exacerbatie COPD.

Exacerbatie COPD is een plotselinge verergering van klachten bij COPD. Raadpleeg in dit geval uw (huis)arts.

Bijwerkingen:

Geen

**Hoe gebruikt u de Dry Salt Inhaler?**

1. Verwijder de dop van het mondstuk.

mond inhalatie (onderste luchtwegen)

2. Inhaleer door de Dry Salt Inhaler zoals normaal.
3. Na inhalatie verwijdert u de Dry Salt Inhaler van de mond en ademt u via de neus uit.
4. Deze nasale uitademing is een voorwaarde om het therapeutisch effect van het zout te bereiken.

nasale inhalatie (bovenste luchtwegen)

2. Plaats de nasale adapter op de Dry Salt Inhaler.
3. Plaats het neusstuk voorzichtig in een neusgat en blokkeer het andere neusgat met de vinger. Inhaleer zoals normaal via de neus.
4. Na inhalatie verwijdert u de Dry Salt Inhaler en ademt u via de mond of via het andere neusgat uit.

Duur van de behandeling:

Gebruik de Dry Salt Inhaler dagelijks 15-20 minuten gedurende 21 dagen. Deze tijd mag verdeeld worden over de dag. (bv 3 maal 5-6 minuten)
Herhaal indien gewenst. Het is veilig om de Dry Salt Inhaler onbeperkt te gebruiken. U kunt geen overdosis zout binnen krijgen.

Disclaimer:

Bovenstaande informatie is niet beoordeeld door de FDA. Dit product is niet bedoeld om huidige therapie of medicatie te vervangen noch voor diagnosestelling, genezing of preventie van ziekte.

In geval van acute ziekte raden wij aan uw arts te raadplegen voor gebruik.

De Dry Salt Inhaler is verkrijgbaar zonder recept. Voor meer informatie kunt u terecht op www.zouttherapie.nl of contact opnemen via info@zouttherapie.nl

Wij zijn ervan bewust dat alles wat wij doen wellicht verbeterd kan worden. Mocht u ons willen wijzen op onjuistheden of onvolkomenheden dan verzoeken wij u ook om contact op te nemen met bovenstaand adres.

WAARSCHUWING:**In het neusstuk van de DSI zit een zakje korrels. Gooi dit weg.**

Deze silicakorrels dienen om de DSI droog te vervoeren.

